

Înălțător vas WC Clipper II Herdegen 11 cm

Montaj si utilizare

Despachetați înălțătorul de vas WC. Avem corpul înălțătorului, din polipropilena de înalta densitate, culoare alba, si cele patru cleme de fixare, culoare albastra, din același material.

Poziționați înălțătorul pe o suprafață plana, de exemplu pe masa, cu partea care va sta pe vasul WC în sus, conform imaginii următoare:



Introduceți cele patru cleme de fixare în locașurile destinate, astfel încât sa fie fixate. **Nu le împingeți pana la refuz**, acest lucru îl vom face ulterior.

Luăți înălțătorul si poziționați-l deasupra vasului WC cu clemele de prindere către vas



Așezați înălțătorul pe vasul WC, începeți să împingeți încet, prin rotație clemele de prindere până când acestea vor atinge suprafața vasului WC



În acest moment înălțătorul este fixat corect de vasul WC-ului și poate fi utilizat în deplină siguranță. Dacă în aceeași încălțăminte sunt mai mulți utilizatori, înălțătorul poate fi extras de pe vasul WC-ului prin simpla ridicare. Clemele de prindere vor

rămâne fixate pe înălțător astfel ca ulterior înălțătorul se reține pe vasul WC-ului fără alte operații suplimentare.



În acest mod înălțătorul se poate lua, spala, dezinfecta, etc și apoi poate fi așezat pe vasul WC-ului

Dacă dorim să demontăm clemele de fixare în vederea ambalării, transportului, trebuie să apăsați pe clapeta de deblocare mișcarea (a) din imaginea de mai jos pentru fiecare clemă de fixare și apoi să trageți clemă către exterior, mișcarea (b) din imaginea de mai jos, până se detașază de corpul înălțătorului

