

Scara pentru acces în cada de baie model 550806 Herdegen



1. treaptă scăriță
2. cadru de sprijin
3. braț pentru fixarea de cada de baie
4. șurub de strângere de cada de baie
5. parte superioară mâner

1. treapta scăriței stabilă solidă cadrul 2 se poate monta în stânga sau dreapta, cum este mai comod de urcat în cada
2. cadrul de sprijin se montează în componenta 1 prin introducerea piciorului în dreapta sau stânga așa cum se vede în imaginea de mai sus.
3. coborâți brațul de fixare până se sprijină de marginea superioară a căzii
4. strângeți șurubul până obțineți o fixare solidă a scăriței de cadă
5. folosiți partea superioară a mânerului pentru a avea o priză bună în timp ce intrați în cadă

