

Comoda din aluminiu pentru scaun toaleta si dus

Model RX299

Asamblare comodă

Comoda din aluminiu model RX299 poate avea mai multe utilizări:

- comoda WC, se așază utilizatorul pe comoda, este deplasat până în camera de baie, se poziționează deasupra deasupra vasului de toaletă, se pun frânele pe roțile din spate, utilizatorul își rezolvă necesitățile fiziologice. Comoda din aluminiu are lățime redusă (53 cm) astfel încât poate intra pe ușa băilor de bloc.

- scaun de duș, comoda este din aluminiu, material plastic și textil, este rezistentă la apă și poate fi utilizată ca un fotoliu pe care stă utilizatorul. Comoda se plasează în camera de baie cât mai aproape de sifonul de scurgere, pacientul stă pe comoda unde este săpunit și clătit cu dușul

Componentele banchetei de duș

fig.1



1. ansamblul șezut și sprijin picioare
2. laterală stânga
3. laterală dreapta
4. spătar
5. pachet cu șuruburi și piulițe pentru montaj

Montaj – se folosesc piulițele și șuruburile livrate împreună cu comoda, așezați șezutul pe pardoseală vezi fig.2 și deasupra una din laterale, în detaliul din imagine urmăriți cum sunt plasate șaibele, astfel încât acestea se așază pe curbura țevii din aluminiu. Laterala este poziționată astfel încât în partea din spate se găsește roata dotată cu frână, Strângeți piulițele succesiv, progresiv, fără a forța deoarece se pot deforma țevile.

Întoarceți ansamblul format cu calată parte în sus pentru a monta în același mod cealaltă laterală a comodei fig.3

Ridicați comoda pe roți, montați spătarul fig.4 și fig.5

fig.2



fig.3



fig. 4

fig. 5

