

**Fotoliu rulant cu antrenare manuala tip RX168**  
**Parti componente, pliere depliere**



1. mânere pentru deplasarea fotoliului de către asistentul utilizatorului
2. spătarul fotoliului, tapițerie lavabila, textura
3. Suport sprijin pentru brate
4. șezutul fotoliului, tapițerie lavabila, în cazuri de murdărie extrema se poate detașa și spala în mașina de spălat rufe
5. banda pentru susținerea picioarelor utilizatorului, este prinsă cu benzi velcro și se poate detașa
6. set de gauri pentru reglarea în înălțime a suportului de sprijin al picioarelor
7. suport de sprijin al picioarelor, înainte de așezarea utilizatorului sau de ridicarea acestuia de pe fotoliu, **suportii de sprijin picioare se ridică la verticală**, dacă utilizatorul calcă direct cu toată greutatea pe acești suportți, fie fotoliul se răstoarnă peste el sau suportii se rup.
8. roata fata, diametrul 8 inch

9. frâne fotoliu, pe fiecare roata, se actioneaza simultan, nu se face nici-un transfer pe sau de pe fotoliu dacă **nu se pun frânele pe ambele roti spate**
10. suport spate, asistentul apasă cu piciorul pe el, fotoliul se ridica ușor de la roțile fata pentru a depăși anumite obstacole, borduri, praguri, etc
11. roata spate, diametrul 24 inch
12. inele de autotractare atasate roților spate, utilizatorul apuca ambele inele și le trage sau împinge determinând deplasarea fotoliului înainte sau înapoi; dacă se acționează un singur inel fotoliul va coti în aceeași direcție, mai clar dacă trage de inelul din dreapta fotoliul va vira către dreapta.

### **Depliere fotoliului rulant**



așezat cu fata catre fotoliu se apasă cu ambele palme simultan în direc ția indicata în mișcarea “a”, după ce șezutul și spătarul fotoliului s-au întins, cu frânele puse, așezați utilizatorul pe fotoliu, coborâți suportii de picioare conform mi șcării “b” și apoi sprijiniți talpa picioarelor utilizatorului de cei doi suportți. Deblocați frânele și începeți deplasarea.

#### **Plierea fotoliului rulant**



după ce utilizatorul a părăsit fotoliul rulant, ridicați suportii de picioare conform "a", apucați șezutul cu cele doua mâini în punctele "b" și ridicați brusc, fotoliul se va plia, este gata pentru depozitare sau pentru transport