

Manual de utilizare pentru Inaltator de vas WC, 02-7060, Kid-Man

Respectați instrucțiunile de utilizare!

Citiți aceste instrucțiuni cu atenție înainte de utilizare și păstrați-le pentru referințe ulterioare!

02-7060S4
02-7060S6



02-7060L4
02-7060L6



Inaltatorul de WC Kid-Man este creat pentru a oferi asistenta la toaleta. Se potriveste cu majoritatea scaunelor de toaleta, inaltandu-le cu 10 cm sau cu 15 cm. Avand un contur confortabil, inaltatorul permite distributia unitara a greutatii, iar partea sa frontala larga faciliteaza igiena. Inaltatorul de WC se instaleaza ferm pe scaunul existent al toaletei utilizand clipsurile laterale. Instalare rapida si usoara fara unelte. Inaltatoarele de WC sunt disponibile si in varianta cu capac,

pentru prevenirea mirosurilor neplacute.


Verificati toate elementele cu atentie inaintea asamblarii produsului. Nu asamblati daca unul dintre elemente este degradat. Nu asamblati daca lipseste un element. Pachetul trebuie sa contina elementele de mai jos:

1. O bucata inaltator WC, cu / fara capac
2. Un corp inaltator

3. Doua bucati de cleme de prindere in forma de L

Daca aveti toate elementele puteti incepe instalarea. Inainte de aceasta asigurati-va ca vasul de toaleta existent este prins in siguranta si ne-avariat. Ridicati capacul scaunului de toaleta inaintea instalarii inaltatorului de WC.


1. Pozitionati inaltatorul de WC cu fata in jos pe o suprafata plata si instalati suportii in fantele de pe scaun (diagrama 1).

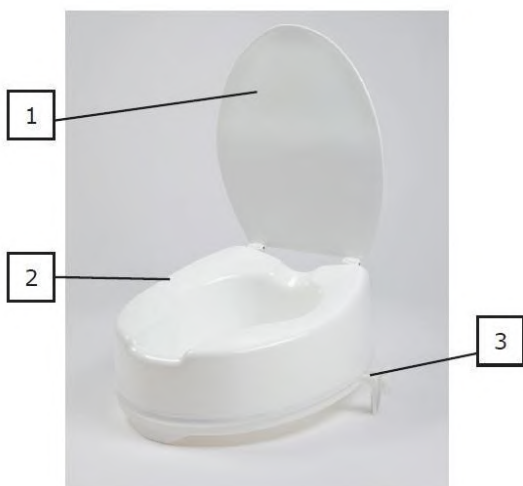

2. Pozitionati unul dintre suportii in forma de L in una dintre fantele inaltatorului WC. Apoi impingeti usor suportul si rasuciti manerul in sens orar cand se fixeaza marginea. Repetati actiunea cu al doilea suport pe partea opusa a inaltatorului.

Nu mai strangeti in aceasta etapa.

3. Intoarceti inaltatorul si plasati-l pe vasul standard de toaleta existent si strangetii ambii suporti pana se lipeste de vasul existent de toaleta.

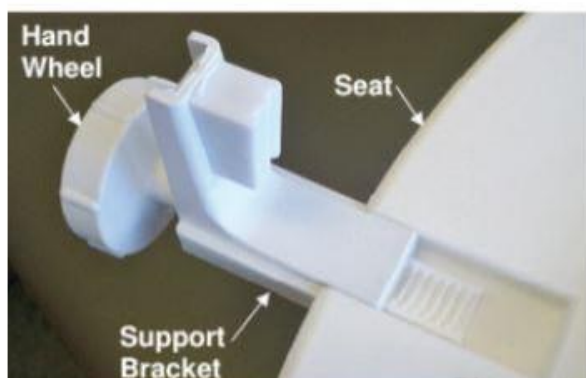

Asigurati-va intotdeauna ca inaltatorul WC este bine instalat si fixat pe toaleta inainte de utilizare.

Nu va sprijiniti de inaltator cand va asezati sau ridicati de pe el.

Nu va asezati pe capacul inaltatorului.

Verificati mereu uzura si securitatea inaltatorului.