
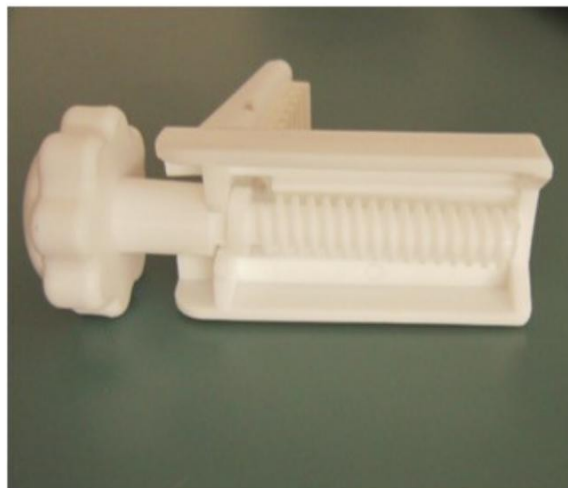


## Înălțător pentru vasul de WC Herdegen inaltime 14 cm

Persoanele care au suferit intervenții chirurgicale, fracturi, proteze ale încheieturii șoldului trebuie să utilizeze un înălțător pentru vasul de toaletă pentru a reduce solicitarea indusă în articulația șoldului. Înălțătorul este realizat din prolipropilenă de culoare albă, se poate adapta pe orice vas de toaletă standardizat prin intermediul a două cleme reglabile.

Scoateți din ambalaj înălțătorul de vas wc, coletul trebuie să conțină corpul înălțătorului și două cleme pentru montajul pe vasul de wc.

Clema arată conform imaginilor de mai jos:

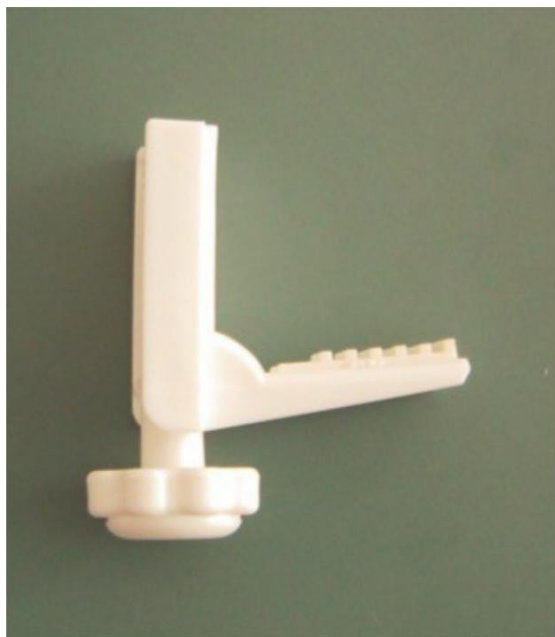

Întoarceți înălțătorul cu fața superioară în jos și fața care vine către wc spre dvs. Introduceți cele două cleme de fixare conform imaginii de mai jos:



Înșurubați câteva ture fiecare șurub al clemei astfel încât clema să rămână fixată în locul ei. Întoarceți înălțătorul și puneți-l peste vasul de toaletă conform figurii de mai sus

Strângeți succesiv fiecare clema prin rotirea fiecărui șurub până obțineți o fixare sigură a înălțătorului pe vasul de toaletă. Dacă se dorește demontarea, deșurubați câteva ture fiecare șurub și ridicați înălțătorul de pe vas.