

Medisorb F - metoda de aplicare



Pentru protejarea zonei afectate impotriva abraziunilor si umezelii, trebuie aleasa masura potrivita de Medisorb F. Aceasta va acoperi intreaga suprafata afectata a pielii. Inaintea aplicarii pansamentului se pun manusile, iar pielea trebuie sa fie curata si uscata. Urmatorul pas este aplicarea pansamentului.



1. Se desface ambalajul si se scoate pansamentul.



2. Se indeparteaza hartia(alba) de protectie din partea centrala inferioara a pansamentului, se tine de marginile din hartie si se aplica pe piele.



3. Se pune pansamentul pe rana.



4. Se indeparteaza hartia(alba) de protectie de pe margini si se lipeste si restul pansamentului. Se apasa usor pe marginile pansamentului.



5. Se indeparteaza folia de protectie din plastic, in directia indicata de sageti.



- 6.