


## Medisorb P - metoda de aplicare



Se alege marimea pansamentului, astfel incat sa acopere intreaga suprafata a ranii, lasand un spatiu liber, in jurul ranii, de 2-3 cm.

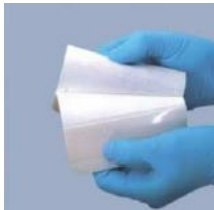

1. Inaintea aplicarii pansamentului, se pun manusi si se spala rana cu solutie salina 0.9%. Pielea din jurul ranii sa fie uscata.
2. Se alege marimea potrivita a pansamentului, astfel incat sa acopere intreaga suprafata a ranii, lasand un spatiu liber, in jurul ranii, de 2-3 cm.
3. Se indeparteaza hartie de protectie mai mare si se aplica pansamentul pe rana.



4. Se indeparteaza a doua hartie de protectie si se lipeste pansamentul, apasand usor marginile.
5. In cazul locurilor dificile (calcai sau cot), pentru a facilita lipirea pansamentului, marginile pot fi taiate in functie de nevoile individuale.
6. In cazul escarelor din zona sacrala, se intoaie pansamentul, se pune in zona interfesiera si se preseaza usor. Daca pacientul sufera de incontinenta urinara sau fecala, marginile pansamentului se fixeaza cu banda adeziva.



### OBSERVATII:

7. Pansamentul trebuie verificat zilnic, pentru a preveni scurgerea de lichide. Daca nu sunt efecte ingrijitoare, pansamentul poate fi tinut pe rana pana la 7 zile. Pansamentul trebuie indepartat urgent daca apar semne de infectie. Tratamentul poate fi continuat dupa disparitia inflamatiei.

